



POWIERZCHNIE



Meliseptol[®] pure

UNIKALNY. DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI. BEZ ZAPACHU

Meliseptol[®] pure

SZYBKA I SKUTECZNA DEZYNFEKCJA – BEZ SUBSTANCJI DRAŻNIĄCYCH

OBSZAR ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie i dezynfekcja małych powierzchni w szpitalach i innych jednostkach związanych z branżą medyczną
- Możliwość użycia w branży usługowej i pielęgnacyjnej (np: fryzjerstwo, podologia, kosmetologia, SPA, salony masażu, tatuaże, piercing) oraz w placówkach oświatowych
- Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych
- Do powierzchni mających kontakt z żywnością

PRZEZNACZENIE

Preparat do:

- czyszczenia i dezynfekcji powierzchni urządzeń, wyposażenia i nieinwazyjnego sprzętu medycznego: foteli zabiegowych, łóżek szpitalnych, wyposażenia sal oraz innych rodzajów powierzchni wyrobów medycznych
- dezynfekcji miejsc trudnodostępnych
- powierzchni metalowych o wysokim połysku
- wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholi

Materiały wrażliwe na alkohol powinny być najpierw przetestowane pod kątem kompatybilności materiałowej. Nie używać do czyszczenia szkła akrylowego

SPOSÓB UŻYCIA

Zwilżyć czyszczoną powierzchnię nierozcieńczonym roztworem i pozostawić na określony czas działania

WŁAŚCIWOŚCI

- Meliseptol Pure jest unikalnym, wysoce skutecznym środkiem dezynfekcyjnym opartym na etanolu (średnio stężonym)
- Szybkie działanie – 1 minuta
- Posiada znakomite właściwości czyszczące, odtłuszczające
- Bez substancji drażniących
- Bez zawartości aldehydów i QAV. Bez zawartości glioksalu
- Szerokie spektrum działania: m.in. prątki, wirusy bezotoczkowe, Rota-, Adeno-, Norowirus (MNV)
- Skuteczność potwierdzona licznymi badaniami
- Biodegradowalny: surfaktanty i aktywne składniki produktu zgodne z metodami OECD oraz wymogami regulacji EC nr 648/2012 (Europejska regulacja dot. detergentów)
- Bez komponentów zapachowych

Meliseptol[®] pure: 100g roztworu zawiera: Etanol: 44,0g
Dodatki: < 5 % surfaktanty, oczyszczoną wodę

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA

Mikroorganizm	Normy testowe	Czas działania
Bakterie/ Grzyby	EN 13727, EN 13624, EN 13697 (z włączeniem EN 1040, EN 1275) EN 16615: 2015 (tzw. norma czteropolowa - warunki brudne)	1 min
Prątkobójczy (M.terrae, M.avium)	EN 14348	1 min
Prątki gruźlicy (M.terrae)	EN 14348	1 min
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV)	DVV/RKI*	30 sek
Rotawirus	EN 14476	30 sek
Adenowirus	EN 14476	30 sek
Norowirus (MNV)	EN 14476	30 sek

*Rekomendacje RKI, Bundesgesundheitsbl. 01-2004, DVV/RKI test zawieszinowy Wyrób medyczny klasy IIa

CE 0123

Dostępne opakowania

Dostępne opakowania	Numer kat.
Meliseptol [®] Pure spray 250 ml	19926
Meliseptol [®] Pure 1000 ml (EURO*)	19927
Meliseptol [®] Pure kanister 5 l	19958
Spryskiwacz do butelek 1000 ml biały	3908012
Spryskiwacz do butelek 1000 ml economy	3908013

*prostokątna butelka typu EURO – bez spryskiwacza



Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 64-300 Nowy Tomyśl | ul. Tysiąclecia 14
Tel. 61 44 20 100 | Fax 61 44 23 936 | www.bb Braun.pl

Aesculap Chifa – firma grupy B. Braun

OPM-IC-124

08/09/2021